

Novaltis

*Transfert assis/assis
Très maniable et compact*



Bandes talonnières
réglables

Démontage sans outil

Novaltis

Pliage rapide, rangement discret



Aucun démontage du vérin n'est nécessaire. Le vérin reste protégé par la structure du lève-patient.

UTILE ET PRATIQUE



Sa structure équilibrée lui permet d'être **rangé à la verticale**, en toute sécurité.



Novaltis est désormais démontable sans outillage.

Démontage facilité pour le transport et la manutention par 1 seule personne.



ALIMENTATION ELECTRIQUE

- ① - Arrêt d'urgence
- ② - Descente électrique d'urgence
- ③ - Voyant de fonctionnement



RECHARGE DE LA BATTERIE, 2 possibilités :

en branchant directement l'appareil à une prise secteur murale grâce au chargeur intégré

ou

à distance en enlevant la batterie pour la connecter seule à une prise murale.



Transfert rapide et efficace



Grâce aux nouvelles sangles lombaires proposées sur **Novaltis**, et au coussin cale-tibias ample et profond en mousse confortable, le transfert se fera rapidement et en toute sécurité.

Ce type de transfert «semi-actif» particulièrement adapté aux patients ayant des difficultés à tenir la station verticale, présente des avantages tant pour les personnes transférées que pour les soignants :

- Stimulation de l'autonomie résiduelle.
- Change et toilette facilités.
- Accès rapide et compacité du produit.

Produit léger et maniable


Un encombrement minimum associé à une structure légère et des roues performantes font de **Novaltis** un lève-patient maniable et sécurisant.

Roues à double galets,
Ø 75 mm.
Haut niveau de roulage et de solidité.

Optimisation de l'écartement au pied de la base, grâce à un système mécanique sans jeu.



Une poignée ergonomique permet aux personnes de toutes tailles de trouver une position des mains idéale et efficace pour la poussée et la manipulation du lève-patient.

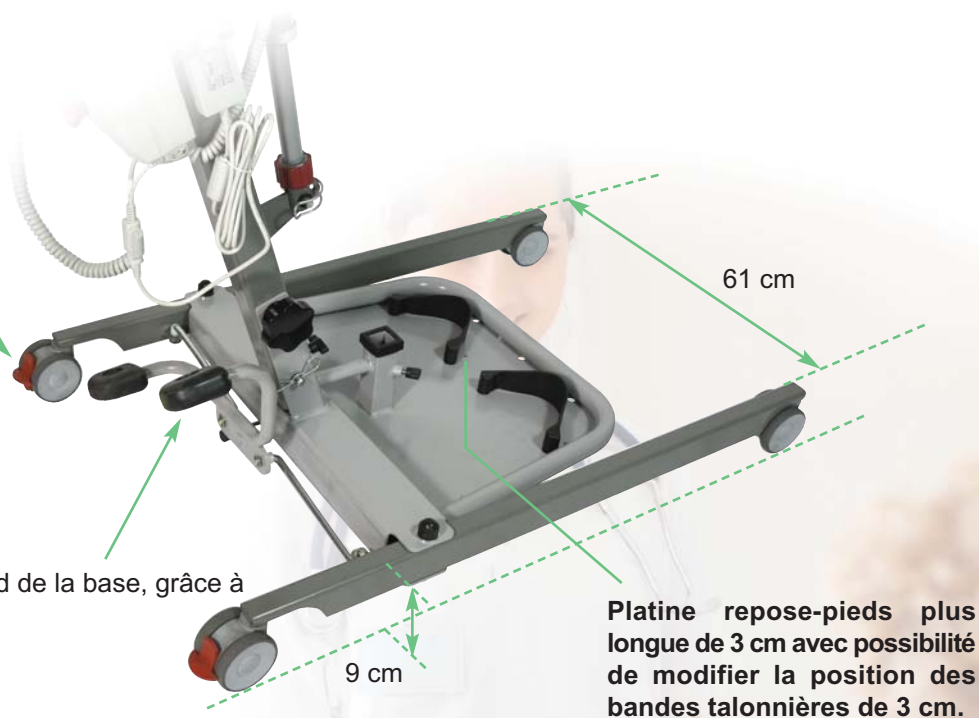

4 sangles ergonomiques efficaces



Sangles lombaires standards
 Taille Médium - Réf. SR 370 1000
 Taille Large - Réf. SR 370 2000



Sangles lombaires avec appui dorsal
 Taille Médium - Réf. SR 370 3000
 Taille Large - Réf. SR 370 4000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence du Novaltis :	SR2910000
Capacité de levage :	175 kg
Vérin :	8000 N
Largeur hors tout de la base :	63 cm
Longueur hors tout :	103 cm
Hauteur de la base :	9 cm
Hauteur poignée à pousser :	79 à 101 cm
Ecartement intérieur des pieds :	54 cm à 81 cm
Poids net de l'appareil :	39 kg



**Sur structure, vérin
et boîtier de contrôle**

Conforme à la norme NF-EN-10535 / Vérins IP X4 - **CE**

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

DUPONT MEDICAL

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
 ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54 390 FROUARD
 (France)
 Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>